



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE NIVEL MEDIO
DE PALAS DE LARINGOSCOPIOS
EN LOS PROCESOS
ASISTENCIALES**

Código: HGDC-GA-GCE-GCTLD-I-LDNNM-PLPA-001

Versión: 001

Página 1 de 7

Ministerio de Salud Pública
Hospital General Docente de Calderón



**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE NIVEL
MEDIO DE PALAS DE LARINGOSCOPIOS EN LOS PROCESOS
ASISTENCIALES DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE
CALDERÓN**

MAYO, 2025



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE NIVEL MEDIO
DE PALAS DE LARINGOSCOPIOS
EN LOS PROCESOS
ASISTENCIALES**

Ministerio de Salud Pública
Hospital General Docente de Calderón

Código: HGDC-GA-GCE-GCTLD-I-LDNM-PLPA-001
Versión: 001
Página 2 de 7

PRÓLOGO Y DERECHOS DE AUTOR

Este Documento es una creación propia del Hospital General Docente de Calderón. La Unidad de Calidad es responsable del buen uso de este documento.

Los propósitos de esta creación responden a la estandarización y a la Gestión de Calidad del Hospital General Docente de Calderón.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobado por:	MSc. Alonso Ernesto Herrera Tasiguano	Gerente General	
Validado por:	Espc. Danny Patricio Flores Almeida	Director Asistencial	
Revisado por:	Espc. Danilo Vladimir Lara Sisa	Responsable de Gestión de Calidad	
Elaborado por:	Lcda. Amanda Elizabeth Sumba Vásquez	Coordinadora Técnica de Central de esterilización	
	Lcda. Ercilia Carolina Caizaluisa Toapanta	Responsable de la Gestión de Enfermería	

 <p>REPÚBLICA DEL ECUADOR</p>	<p align="center">INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE NIVEL MEDIO DE PALAS DE LARINGOSCOPIOS EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES</p>	<p align="center">Ministerio de Salud Pública Hospital General Docente de Calderón</p>
	<p align="center">Código: HGDC-GA-GCE-GCTLD-I-LDNM-PLPA-001 Versión: 001 Página 3 de 7</p>	

CONTENIDO

1. PROCEDIMIENTO/PROCESO O PROTOCOLO EN LOS QUE APLICA.....	4
2. OBJETIVO	4
3. INSUMOS NECESARIOS.....	4
4. TAREAS A REALIZAR	5
5. ANEXOS.....	7
6. CONTROL DE CAMBIOS.....	7



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE NIVEL MEDIO
DE PALAS DE LARINGOSCOPIOS
EN LOS PROCESOS
ASISTENCIALES**

Ministerio de Salud Pública
Hospital General Docente de Calderón

Código: HGDC-GA-GCE-GCTLD-I-LDNM-PLPA-001

Versión: 001

Página 4 de 7

1. PROCEDIMIENTO/PROCESO O PROTOCOLO EN LOS QUE APLICA

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PRE LAVADO EN EL HGDC

link: <https://cloud.hgdc.gob.ec/index.php/s/bAwEM7f9Mpng2zQ>

2. OBJETIVO

Realizar limpieza y descontaminación de las palas de laringoscopios en los Procesos Asistenciales, para evitar una fuente potencial la transmisión cruzada entre los pacientes que necesitan intubación endotraqueal.

3. INSUMOS NECESARIOS

- a) Prendas de protección personal (bata, mascarilla y guantes de manejo)
- b) Detergente Enzimático
- c) Cepillo de cerdas suaves
- d) Toallas de microfibra
- e) Desinfectante alcohol al 70 %
- f) Dos (2) Contenedor plástico (Enzimático y almacenado)
- g) Agua potable
- h) Guantes de manejo
- i) Gasas

4. TAREAS A REALIZAR

N°	TAREA	REGISTRO DOCUMENTAL
1	<p>Desmontar el mango y extraer el cartucho de la lámpara y la pala del laringoscopio.</p> 	No aplica
2	<p>Realizar la limpieza y desinfección del mango del laringoscopio</p> <p>Limpieza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humedecer una microfibras con solución de detergente enzimático al 10% por 15 minutos al mango del laringoscopio y dejar actuar. • Frotar el mango del laringoscopio con una microfibras humedecida ligeramente con agua corriente NO MOJADA (para evitar daño en el interior del equipo). • Secar con una toalla de microfibras. <p>Desinfección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mojar una gasa No empapada con alcohol al 70% (para evitar daño en el interior del equipo) y frotar por el mango del laringoscopio siguiendo su contorno. • Guardar en el contenedor indicado. 	No aplica



INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE NIVEL MEDIO DE PALAS DE LARINGOSCOPIOS EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES

Ministerio de Salud Pública
Hospital General Docente de Calderón

Código: HGDC-GA-GCE-GCTLD-I-LDNNM-PLPA-001
Versión: 001
Página 6 de 7

Realizar la limpieza y desinfección de las palas u hoja del laringoscopio en los procesos asistenciales

PARTES DE LA PALA U HOJA DE LARINGOSCOPIO



Prelavado:

- Sumerja la pala del laringoscopio en una solución de detergente enzimático durante 15 minutos.

3

Cepillado:

- Utilice un cepillo cerdo suaves exclusivo para laringoscopios.
- Introduzca el cepillo suavemente por la ranura de la fuente de luz a lo largo de la espátula.
- Evite ejercer demasiada presión para no dañar la fuente de luz.

Enjuague:

- Enjuague con abundantemente agua corriente la pala, desde la base hacia la punta.

Secado:

- Seque completamente la pala con una toalla de microfibra, prestando especial atención a la ranura de la fuente de luz y la espátula.

Desinfección: (desinfectante de medio nivel)

Registro de limpieza y desinfección

 REPÚBLICA DEL ECUADOR	INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE NIVEL MEDIO DE PALAS DE LARINGOSCOPIOS EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES	Ministerio de Salud Pública Hospital General Docente de Calderón
	Código: HGDC-GA-GCE-GCTLD-I-LDNM-PLPA-001 Versión: 001 Página 7 de 7	
	<ul style="list-style-type: none"> Mojar una gasa No empapada con alcohol al 70% (para evitar daño en la fuente de luz) y frotar desde la base de la pala hasta laringoscopio hasta la punta de la espátula, siguiendo su contorno, En forma delicada frotar las ranuras de la fuente de luz, se puede ayudar con un aplicador con alcohol, evitar movimientos bruscos 	
4	Realizar el Envasado correctamente <ul style="list-style-type: none"> Colocar la pala en su contenedor. Rotule con la fecha, hora y nombre del responsable que realizó el procedimiento. 	No aplica
5	Realizar el almacenamiento correctamente <ul style="list-style-type: none"> El contenedor exclusivo para las palas de laringoscopio debe ser seguro. Almacene en el lugar designado para el contenedor 	No aplica

5. ANEXOS

<https://www.urgenciasyemergen.com/laringoscopio-mangos-hojas-bombillas-y-limpieza/>

Ficha técnica de equipo laringoscopio Welch Allyn

6. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción del cambio	Sección que cambia	Versión
13/05/2025	Creación del documento	Todo el documento	001